

## Vorschlag für Gebrauchshinweis

### Vorschläge für Gebrauchshinweise an den Endanwender

»Probieren Sie bitte die Schuhe an. Sie müssen einwandfrei passen und dürfen keinerlei Druck stellen erzeugen. Die an den Schuhen angebrachten Verschlusssysteme sind sachgerecht zu benutzen. Die Verwendung von Zubehörteilen, zum Beispiel einige Sohlen etc. kann z.B. negativen Einfluss auf die Schutzfunktion der Schuhe haben. Im Bedarfsfall fragen Sie bitte unbedingt ihre Orthopädienschuhmachermeister.

Die Auswahl der geeigneten Schuhe erfolgt auf der Grundlage der Gefährdungsanalyse.

Wegen der Vielzahl der Einflussfaktoren (Feuchtigkeit und Temperatur bei der Lagerung, Werkstoffänderung über die Zeit) kann ein Verfallsdatum nicht angegeben werden. Darüber hinaus ist die Verfallzeit abhängig vom Grad des Verschleißes, der Nutzung und dem Einsatzbereich. Die auf den Schuhen befindliche Kennzeichnung gibt Hin-weise auf:

- » Hersteller  
(Firmenbezeichnung)
- » Die angewandte Norm
- » Die Kategorie  
(Grundanforderungen,  
Zusatzanforderungen)
- » Die Größen der Schuhe
- » Herstellungsmonat und -jahr
- » Die Typenbezeichnung des Herstellers

Die Schuhe wurden gefertigt von Firma:

Firmenstempel

### Ein paar Tipps:

- » Reinigen und pflegen Sie Ihre Schuhe mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Wir beraten Sie gerne
- » Das Trocknen von nassen Schuhen auf der Heizung ist ungeeignet.
- » Überprüfen Sie die Schuhe vor jedem Tragen kurz auf erkennbare Schäden, z.B. Funktionalität der Verschluss Systems, ausreichende Profilhöhe etc..!
- » Lagern Sie die Schuhe sachgerecht, möglichst im Karton in trockenen Räumen.

Viel Spaß und Freude mit ihren neuen Schuhen!

Überprüfung nach einem halben Jahr Tragezeit durch den Herstellungsbetrieb

Überprüfung nach einem Jahr Tragezeit durch den Herstellungsbetrieb antistatischen Schuhen. «

Überprüfung nach einem halben Jahr Tragezeit durch den Herstellungsbetrieb

Firmenstempel

Überprüfung nach einem halben Jahr Tragezeit durch den Herstellungsbetrieb

Firmenstempel